

## Informations Générales

- Une poche vidable est munie d'un clamp qui permet d'ouvrir la poche, de vider les effluents et de fermer la poche.
- Une poche vidable doit être vidée lorsque sa capacité atteint 1/3 à 1/2 d'effluents.
- Lock 'n Roll est le nom du clamp intégré des poches vidables 1 pièce **Moderma Flex** et des systèmes 2 pièces **Conform 2** Hollister.





## Comment l'utiliser ?

Placez la poche avec la face où se trouve le support vers votre abdomen.



### • Fermeture de la poche

- 1 **Enroulez** le clamp 3 fois vers le haut.
- 2 **Placez** le rabat transparent.
- 3 **Pressez** du centre vers les extrémités.  
Le clamp est verrouillé une fois que vous avez senti les villosités auto-agrippantes s'imbriquer les unes dans les autres.

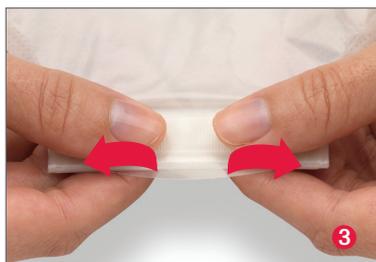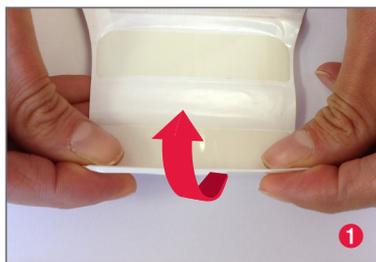

### • Ouverture et vidange de la poche

- 1 **Soulevez** le rabat transparent vers le haut.
- 2 **Sécurité supplémentaire** : contrôlez l'ouverture et la vidange en dépliant le clamp d'abord 2 fois.  
Les barrettes incurvées gardent le clamp fermé et résistent au poids des effluents.
- 3 **Déroulez** la dernière partie du clamp.
- 4 **Pressez** les barrettes vers l'intérieur pour contrôler le débit de la vidange.
- 5 **Nettoyez et séchez** le clamp à l'aide de papier toilette, d'un mouchoir ou d'une compresse.  
Fermez le clamp.

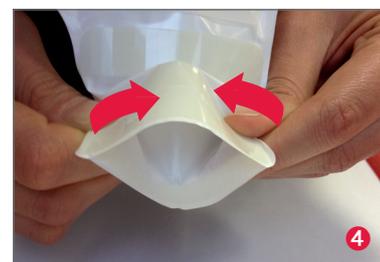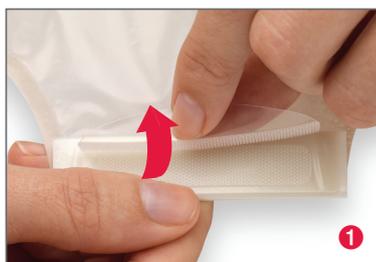

## Questions fréquemment posées

<b>Comment savoir si le clamp est bien fermé ?</b>	Le clamp est bien fermé lorsque vous avez la confirmation tactile que les villosités auto-agrippantes se sont imbriquées les unes entre les autres, en pressant du centre vers les extrémités.
<b>Est-ce que le clamp est sûr lorsqu'il est humide ?</b>	Le système de fermeture par villosités auto-agrippantes est résistant à l'eau. Le clamp est fermé hermétiquement, même lorsqu'il est humide. De plus, grâce aux barrettes et aux villosités, il est facile à nettoyer et à sécher.
<b>Est-ce que le clamp va se voir sous mes vêtements ?</b>	Le clamp est conçu pour être souple, fin et discret sous les vêtements.
<b>Est-ce que le clamp est suffisamment confortable pour s'adapter aux mouvements du corps ?</b>	La forme légèrement incurvée des barrettes est conçue pour s'adapter aux formes du corps (abdomen, aine, cuisse). Ergonomique, le clamp Lock 'n Roll offre un maximum de sécurité, de confort et d'efficacité.
<b>Le clamp peut-il s'ouvrir accidentellement ?</b>	Quand le clamp est correctement fermé, les villosités auto-agrippantes ont prouvé leur efficacité. Elles ne se détachent pas, même en cas d'accrochages accidentels.
<b>Est-ce que l'ouverture et la vidange de la poche sont bruyantes ?</b>	Les villosités auto-agrippantes sont silencieuses et ne font pas de bruit quand on ouvre le rabat ou que le clamp se déplie.

## Conseils et remarques : \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---



***Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à prendre contact avec votre infirmier(e) référent(e).***

Hollister met à votre disposition une ligne et une adresse email spécialement dédiées à vos remarques et suggestions concernant ce produit.

**0 800 479 267** Service & appel gratuits

[assistance.conseil@hollister.com](mailto:assistance.conseil@hollister.com)



**Hollister France**  
Tour Franklin  
100/101 Terrasse  
Boieldieu  
92042 Paris La Défense  
[www.hollister.fr](http://www.hollister.fr)