Conform 2 avec Renforts Adhésifs FormaFlex

Système 2 pièces

- Le système 2 pièces Conform 2 FormaFlex est destiné à appareiller les colostomies, iléostomies et urostomies.
- Il est préférable de changer son support une fois tous les deux ou trois jours et sa poche tous les jours¹.

Matériel recommandé pour la mise en place de votre appareillage

- □ 1 poche
- 1 support FormaFlex
- ☐ Produits nécessaires à la toilette : eau du robinet, compresses non tissées, non stériles
- ☐ Stomimètre/gabarit ou patron
- ☐ Stylo
- ☐ Sachet pour la poche usagée

Comment l'utiliser?

- 1 Nettoyez la stomie à l'eau du robinet.
- 2 Séchez la peau en tamponnant avec une compresse ou autre.
- 3 Chauffez le support entre les mains et roulez les bords du protecteur cutané pour l'ajuster au plus proche de la stomie.
- 4 Enlevez le film plastique.
- **6** Appliquez le support
- 6 Lissez le protecteur cutané au plus près de la stomie afin de permettre une bonne adhésivité et de supprimer les plis parfois formés lors de la mise en forme.
- Tenlevez les protections des renforts adhésifs et collez.
- 6 Enclenchez la poche en passant les doigts sous l'anneau flottant du support. Pincez pour encliquer la poche. Vérifiez la bonne tenue.

















¹ AFET, "Guides des bonnes pratiques en stomathérapie chez l'adulte – entérostomies, urostomies, 2003"



Comment fermer la poche ?

Pour les iléostomies (poches vidables) :

- 1 Enroulez le clamp 3 fois vers le haut.
- Placez le rabat transparent et pressez du centre vers les extrémités.

Le clamp est verrouillé une fois que vous avez senti les villosités auto agrippantes s'imbriquer les unes dans les autres.

Pour les urostomies (poches vidangeables) :

- 1 Si la poche est ouverte, la goutte blanche est visible sur le robinet de vidange et le côté le plus long de la languette se trouve sur la gauche.
- 2 Lorsque le robinet est fermé, on ne voit plus la goutte blanche et le côté le plus long de la languette se trouve sur la droite. Le robinet est symétrique.












- Goutte blanche non visible
- Symétrie du robinet

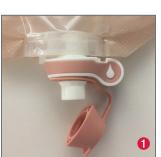

- Goutte blanche visible - Asymétrie du robinet



En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67 Service & appel

assistance.conseil@hollister.com

Hollister France Tour Franklin 100/101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris La Défense Cedex

www.hollister.fr

Ce document est destiné à l'usage des professionnels de santé. Dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I. Fabriqués par Hollister Incorporated. Marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Conform 2 sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. Edition : dec 2017. Référence: FRO203

