

Moderma Flex

Système 1 pièce

- Le système 1 pièce Moderma Flex est destiné à appareiller les colostomies, iléostomies et urostomies.
- Il est préférable de changer sa poche tous les jours¹.



Matériel recommandé pour la mise en place de votre appareillage

- ☐ 1 poche
- ☐ Produits nécessaires à la toilette :
eau du robinet, compresses non tissées,
non stériles
- ☐ Stomimètre/gabarit ou patron
- ☐ Stylo
- ☐ Ciseaux
- ☐ Sachet pour la poche usagée

Comment l'utiliser ?

• Préparation de la poche


- 1 **Découpez le support** à 2-3 mm autour de la stomie ou selon le patron de découpe.

• Soin de la stomie

- 2 **Retirez** l'appareillage du haut vers le bas.
- 3 **Nettoyez la stomie** à l'eau du robinet.
- 4 **Séchez** la peau en tamponnant avec une compresse ou autre.

• Mise en place de l'appareillage

- 5 **Retirez le film protecteur** du support de la poche.
- 6 **Appliquez votre poche** du bas vers le haut sur un ventre tendu.
- 7 **Assurez-vous** de la bonne adhésivité.

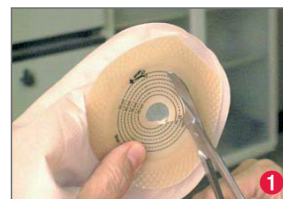


¹ AFET, "Guides des bonnes pratiques en stomathérapie chez l'adulte – entérostomies, urostomies, 2003"

Comment fermer la poche ?

Pour les iléostomies (poches vidables) :

- 1 Enroulez le clamp 3 fois vers le haut.
- 2 Placez le rabat transparent et pressez du centre vers les extrémités.
Le clamp est verrouillé une fois que vous avez senti les villosités auto agrippantes s'imbriquer les unes dans les autres.

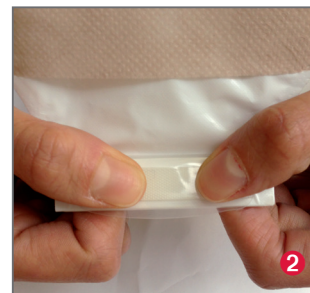

Pour les urostomies (poches vidangeables) :

- 1 Si la poche est ouverte, la goutte blanche est visible sur le robinet de vidange et le côté le plus long de la languette se trouve sur la gauche. Le robinet est asymétrique.
- 2 Lorsque le robinet est fermé, on ne voit plus la goutte blanche et le côté le plus long de la languette se trouve sur la droite. Le robinet est symétrique.



Poche ouverte :
- Goutte blanche visible
- Asymétrie du robinet



Poche fermée :
- Goutte blanche non visible
- Symétrie du robinet

Conseils et remarques :

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67

Service & appel
gratuits

assistance.conseil@hollister.com

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex

www.hollister.fr

Les poches Moderma Flex sont des dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I, fabriqués par Hollister Incorporated. Ces produits de santé portent, au titre de la réglementation, le marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Moderma Flex sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Paris 402 202 733. Edition : avril 2018. Référence: FRO211

