


Adapt Anneau Protecteur

Accessoire

- Il comble les irrégularités autour de la stomie.¹
- Il renforce l'étanchéité et prévient le risque de fuites.¹

Comment l'utiliser ?

- 1 **Sortez l'anneau de son emballage** et retirez les films protecteurs
- 2 **Ajustez l'anneau protecteur** avec vos doigts pour lui donner la taille, la forme et l'épaisseur souhaitées. Pour cela, vous pouvez :
 - A **Etirer**
 - B **Couper et ajuster**
 - C **Aplanir les bords**
 - D **Superposer pour créer un anneau plus petit**
- 3 **Placez l'anneau protecteur** autour de la stomie ou sur l'appareillage.
- 4 **Maintenez** plusieurs secondes en place.
- 5 **Positionnez** votre appareillage comme à votre habitude.

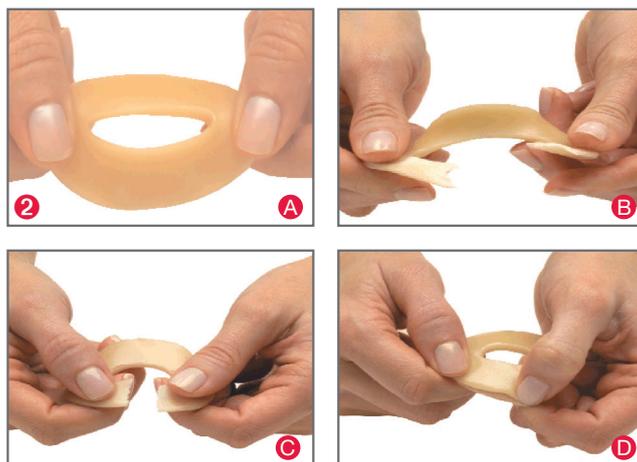

Questions fréquemment posées

Puis-je l'utiliser si ma peau est irritée ?	Sa formule sans alcool évite les picotements.
Quelle est la spécificité de CeraRing ?	L'anneau CeraRing est enrichi en céramide ce qui permet de maintenir la peau en bonne santé.
Comment puis-je le retirer ?	Il se retire simplement lors du changement de l'appareillage. Si besoin, vous pouvez aussi utiliser une lingette pour retrait d'adhésif Adapt.



Produit	Diamètre	Référence	GTIN
Adapt Anneaux Protecteurs Standards (boîte de 10 unités)	48 mm-4,45 mm 48 mm-2,3 mm (slim) 98 mm-4,45 mm	7805 7815 7806	3664463000877 3664463000891 3664463000884
Adapt Anneaux Protecteurs CeraRing (boîte de 10 unités)	48 mm-4,45 mm 48 mm-2,3 mm (slim)	8805 8815	3664463000907 3664463000914

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67 Service & appel gratuits

assistance.conseil@hollister.com

1. Notice d'instructions des anneaux protecteurs Adapt : Anneaux protecteurs conçus pour améliorer l'ajustement d'un appareillage de stomie. Ce produit est un accessoire pour un appareillage de stomie destiné à prévenir les fuites d'effluents sous le protecteur cutané.

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex

www.hollister.fr

Dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I. Fabriqués par Hollister Incorporated. Ces dispositifs médicaux portent, au titre de la réglementation, le marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur (maximum 30°C) et de l'humidité, dans son emballage d'origine. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. Edition : dec 2019. Référence: FRO231

