

Adapt Spray et Lingette de retrait d'adhésif

Accessoires

- Le spray Adapt facilite le retrait du protecteur cutané, en douceur et sans gêner l'appareillage suivant.¹

Comment utiliser le spray ?

1. Vaporisez sur le pourtour du protecteur cutané.
2. Attendez quelques secondes, puis retirez délicatement le protecteur cutané.
3. Renouvelez l'opération si besoin.
4. Attendez quelques secondes que le produit sèche avant de positionner un nouvel appareillage.



- La lingette Adapt enlève les résidus adhésifs²

Comment utiliser la lingette ?

1. Frottez délicatement les résidus adhésifs sur la peau avec la lingette.
2. Attendez quelques secondes que le produit sèche avant de positionner un nouvel appareillage.



Question fréquemment posée

Puis-je les utiliser si ma peau est irritée ? Leur formule sans alcool ne provoque ni sensation de froid ni picotement même sur peau lésée.



Produit	Référence	GTIN
Adapt Spray Spray de 50 ml	7737	3401029563175
Adapt Lingette Boîte de 50 unités	7760	3401029563007

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67

Service & appel
gratuits

assistance.conseil@hollister.com

1. Notice d'instruction du spray de retrait d'adhésif Adapt : Ce produit est un accessoire pour un appareillage de stomie destiné à faciliter le retrait d'un protecteur cutané de stomie ou de résidus d'adhésif.

2. Notice d'instructions de la lingette de retrait d'adhésif Adapt : Pour retirer efficacement les adhésifs, les protecteurs cutanés, pâte ou tout autre résidu collé à la peau.

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex

www.hollister.fr

Dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I. Fabriqués par Hollister Incorporated. Ces produits de santé portent, au titre de la réglementation, le marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. À conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur (maximum 30°C) et de l'humidité, dans son emballage d'origine. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. Edition : Novembre 2019. Référence: FRO232

CE